

# 検査キットが届いてからの流れ

採尿の前に 採尿にあたっては以下をご注意ください。検査が出来ない・結果が正しく反映されない場合があります。

朝一番の尿（起床後、最初に出る尿）を採取してください

- 夜間頻尿などの理由で朝一番の尿が出にくい場合は、前回の排尿から3時間以上経過したタイミングで採取してください。
- 水分を多量に摂取して無理に排尿を促すことは避け、自然な尿意があるときに採取してください。

NG 妊娠中・生理中の場合 20歳未満の場合 血液混入が見られる場合 尿量が不足している場合 郵送条件が守られていない場合

問合せ先

マイシグナルカスタマーサポート

support@misignal.jp ☎ 050-1753-8393 平日 10時～16時

## 1 QRコードの読み取り

お手持ちのスマートフォン、タブレット端末などのカメラでQRコードを読み取ります。




[https://misignal.jp/qr/r/j8wb\\_6ae7](https://misignal.jp/qr/r/j8wb_6ae7)

※QRコードが読み取れない場合は、URLを直接入力してください。

## 2 Web申込票の入力

① 採尿容器の数字12ケタの検査IDを入力します。

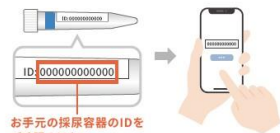

お手元の採尿容器のIDをご確認ください

② 画面の指示に従い、Web申込票を入力します。

必ず入力してください  
ご入力がない場合、お客様情報と尿検体の紐づけができず、検査を行うことができません。

## 朝一番の尿を採取してください

## 3 採尿容器に名前と採尿時間を記入

採尿前に、ラベルシールに名前と採尿時間を記入します。ボールペンまたは油性ペンをお使いください。



## 4 採尿

① 折りたたみコップの底を広げます。



② 始めと終わりの尿は避け、中間の尿をコップに採ります。



## 5 採尿容器に入れる

① コップの上側面をつまみ、注ぎ口を作ります。



② 採尿容器の蓋を外し、青ラベルの範囲まで尿を注いだ後、きつく蓋を閉めてください。



青ラベルの範囲から逸脱しないよう心掛けてください。

## 検体は冷蔵庫で保管してください

## 6 梱包・冷蔵保管

① 採尿容器を返送用透明袋に入れ、チャックをしっかりと閉めます。




吸水シートを取り出さないでください。

② 返送用箱に①を入れます。



③ 箱の封をしたら、冷蔵庫で保管します。

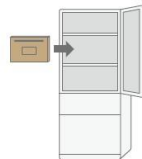

梱包時の確認事項  Web申込票の入力はしましたか？  採尿容器を返送用透明袋に入れてチャックをしましたか？  採尿容器のフタはしっかり閉めましたか？  返送用箱に検体を入れましたか？

## 7 発送

検体は発送直前まで冷蔵庫で保管し、速やかに発送してください。

### 発送方法



Webで24時間集荷の依頼ができます  
Web集荷システム  
<https://misignal.jp/qr/r/dee22vlx4xnt>

集荷の際、ドライバーにクール冷蔵で送ることをお伝えください。

お電話で集荷を依頼する場合 050-1753-8393（平日10時から16時）  
マイシグナルのカスタマーサポートに繋がりますので、集荷のご依頼であることをお伝えください。

マイシグナル専用の配送方法のため、ヤマト運輸営業所や取扱店への持込みはできません。必ず集荷依頼を行ってください。